

*LA GRANDEZA ES
UNA CONQUISTA.*

NEODENT® GRAND MORSE



+591 764 003 08

GM

Conexión
Grand Morse®



Implante
Helix®



Superficie
Acqua



30 años

**CELEBRAR ES
UNA ELECCIÓN.**

 neodent.com/30years



Neodent® celebra su 30º aniversario Con el tiempo, se han creado millones de sonrisas en colaboración con profesionales de todo el mundo. Año tras año, Neodent® sigue celebrando la elección de crear nuevas sonrisas todos los días, para transformar las vidas de los pacientes de más de 80 países en los que la marca está presente.



UNA MARCA GLOBAL

Disponible en más de 80 países con más de 3 millones de implantes vendidos cada año.



FUNDADO POR DENTISTAS PARA DENTISTAS

Un legado de 30 años centrados en la facilidad de uso.



CONCEPTOS DE TRATAMIENTO PROGRESIVO

Soluciones modernas y fiables.



ACCESO A LA TERAPIA Y RENTABILIDAD

Accesibilidad a soluciones probadas y asequibles.

En 2023 Neodent® celebrará todos los logros que hicieron que la marca llegara hasta aquí. Hay muchas razones para celebrar y puede estar al tanto de todas en los canales digitales de Neodent. Síguenos para conocer mejor la historia, la filosofía y las soluciones de la compañía.

NEODENT GLOBAL PLAY

Neodent Global Play es una increíble plataforma en línea de educación y formación que reúne contenido de gran calidad disponible **bajo demanda y de forma gratuita**. Encontrará casos clínicos, vídeos de formación sobre productos, tutoriales y mucho más.

El registro es sencillo y automático, solo tiene que rellenar el formulario para obtener acceso instantáneo a todo este fantástico contenido.



Visite la dirección:

globalplay.neodent.com



Helix[®] Grand Morse[®]

Versatilidad insuperable


Disfrute de una mayor flexibilidad de tratamiento para sus pacientes para crear los resultados de sustitución dental óptimos para todas las indicaciones, desde unitarios hasta completamente edéntulos. Helix[®] Grand Morse[®] permite opciones de tratamiento personalizadas según la situación clínica específica, teniendo en cuenta los principios biológicos y respetando las bases de la implantología dental.



GRAN FIABILIDAD


BASE ESTABLE Y SÓLIDA DISEÑADA PARA EL ÉXITO A LARGO PLAZO

Esta interfaz implante-pilar es crucial para un resultado estético y funcional satisfactorio a largo plazo. La conexión Grand Morse[®] de Neodent[®] ofrece una combinación única basada en conceptos demostrados: un cambio de plataforma asociado con un cono Morse profundo de 16°, con indexación interna incluida para lograr una conexión sólida y estable diseñada para obtener resultados duraderos.

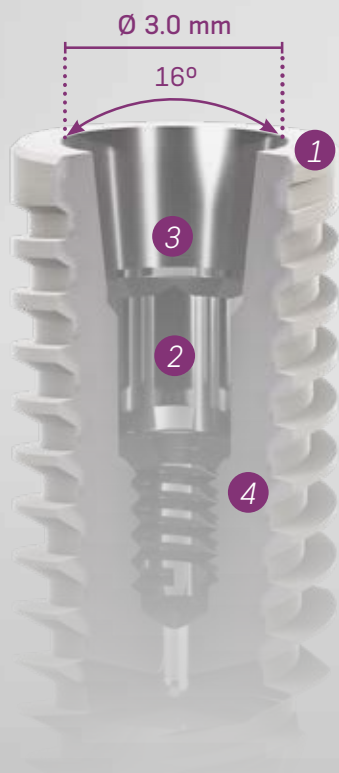

1 Cambio de plataforma

Diseño del pilar con un diámetro más estrecho que el área coronal del implante, lo que permite el concepto de cambio de plataforma⁽¹⁻⁵⁾.

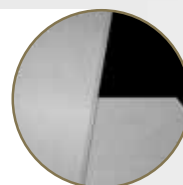

2 Indexación interna

Colocación precisa del pilar, protección frente a la rotación y manipulación sencilla.




3 Conexión profunda

Permite una gran área de contacto entre el pilar y el implante para una distribución óptima de la carga.



4 Conexión con cono Morse de 16°

Diseñada para garantizar un ajuste preciso para un sellado de la conexión óptimo.

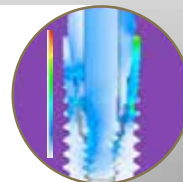



GRAN ESTABILIDAD

DISEÑO PARA TRATAMIENTOS INMEDIATOS PREDECIBLES EN TODOS LOS TIPOS DE HUESO

Las expectativas cada vez mayores de tratamientos de menor duración suponen un reto importante para los profesionales de la odontología. El sistema Grand Morse® de Neodent® ofrece un diseño de implante único, que cuenta con la innovadora superficie hidrofílica Acqua, pensada para maximizar la estabilidad primaria y la predictibilidad en protocolos inmediatos.

IMPLANTE ÓPTIMO DISEÑADO PARA LOGRAR UNA ELEVADA ESTABILIDAD PRIMARIA

El implante Helix® Grand Morse® es un innovador implante híbrido diseñado para maximizar las opciones de tratamiento y para lograr la eficiencia en todos los tipos de hueso.

Diseño de cuerpo cónico completo

- Coronal: 2° - 12°
- Apical: 16°
- » Permite el subfresado



Contorno híbrido

- Coronal: cilíndrico
- Apical: cónico
- » Para lograr estabilidad con flexibilidad en la colocación vertical




Diseño dinámico de espiras progresivas

- Coronal: trapezoidal > compresión
- Apical: en V > autorroscante
- » Alcanza una gran estabilidad primaria en todos los tipos de hueso



Ápice activo

- Punta pequeña suave y redondeada
- Cámaras helicoidales
- » Permite la carga inmediata

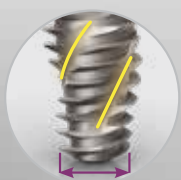


SUPERFICIE HIDROFÍLICA ACQUA PARA UNA ALTA PREDICTIBILIDAD DEL TRATAMIENTO

La superficie hidrofílica Neodent® Acqua es el siguiente nivel de la exitosa superficie SLA, desarrollada para lograr resultados satisfactorios incluso en situaciones complejas como, por ejemplo, en hueso blando o en protocolos inmediatos.^[6-9]



Superficie NeoPoros

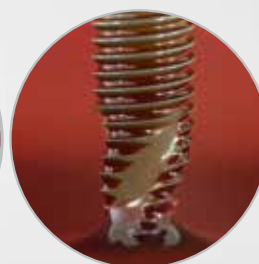

Superficie hidrofílica Acqua

Capacidad hidrofílica:

La superficie hidrofílica presenta un ángulo de contacto más pequeño cuando entra en contacto con líquidos. Esto proporciona una mayor accesibilidad de los líquidos orgánicos a la superficie del implante Acqua.^[7]



GRAN ESTÉTICA

OFRECE UNA ESTÉTICA NATURAL INMEDIATA

Hoy en día, los pacientes esperan unos tiempos de tratamiento cortos y unos resultados estéticos. La gama de restauración Grand Morse® de Neodent® ofrece flexibilidad para simplificar el tratamiento de los tejidos blandos, respetando las distancias biológicas con el fin de conseguir una función y una estética inmediatas.

SIGUIENTE NIVEL DE TRATAMIENTO INMEDIATO DE ARCADA COMPLETA FIJA

El Mini pilar cónico Neodent® Grand Morse® se ha diseñado para mejorar el tratamiento de arcada completa fija mediante la optimización del perfil de emergencia del pilar, lo que reduce la necesidad de procedimientos invasivos.



Pilar provisional
de titanio



Pilar Pro Peek



Base de titanio



Base de titanio C



Base de titanio para
puente



Bloque de titanio
(soporte AG
o Medentika)



Pilar CoCr



Pilar anatómico
(recto y angulado)



Pilar Universal
(recto y angulado)



Pilar



Mini pilar cónico
angulado



Novaloc
(recto y angulado)



Base de titanio AS



Mini pilar cónico
recto



Micro pilar



Prótesis atornillada
unitaria



Prótesis cementada
unitaria



Sobredentadura



Prótesis
atornillada múltiple



Prótesis cementada
múltiple



Temporal



GRAN SIMPLICIDAD

MAYOR FACILIDAD DE USO

El tratamiento con implantes se ha convertido en una parte integral de la odontología, con un creciente número de pacientes que solicitan este tratamiento. El sistema de implantes Grand Morse® de Neodent® ofrece un diseño inteligente que proporciona eficiencia y simplicidad dentro de la red del tratamiento dental, tanto en la fase quirúrgica como en la de restauración.

UNA PLATAFORMA PROTÉSICA

Todos los implantes Neodent® Grand Morse® cuentan con la exclusiva conexión Grand Morse® independientemente del diámetro del implante.



UN DESTORNILLADOR

El destornillador Neo tiene una conexión en estrella fiable y duradera, compatible con todos los pilares de cicatrización y tornillos de cierre y la mayoría de los tornillos de restauración Neodent® Grand Morse®.



UN DRIVER

El driver de Neodent® permite la recogida y colocación sencillas y fiables del implante.



UN KIT QUIRÚRGICO

Kit quirúrgico compacto intuitivo y funcional que permite la colocación de implantes Helix GM® en todo tipo de hueso.



IMPLANTE/SUPERFICIE

SECUENCIA DE PERFORACIÓN

PARALELIZADOR

DRIVERS Y CARRACA

CICATRIZADORES

Indicaciones: todas las situaciones clínicas y diferentes densidades óseas. Colocación en hueso de tipo III y IV (con posibilidad de subinstrumentación), I y II con el uso de fresas de contorno. Velocidad de fresado: 800-1200 rpm para huesos de tipo I y II; 500-800 rpm para huesos de tipo III y IV | Velocidad de colocación: 30 rpm | Torque de inserción máximo: 60 N.cm

Ø 3.5	Acqua	NeoPoros
8.0	140.943	109.943
10.0	140.944	109.944
11.5	140.945	109.945
13.0	140.946	109.946
16.0	140.947	109.947
18.0	140.988	109.988

Ø 4.3	Acqua	NeoPoros
8.0	140.948	109.948
10.0	140.949	109.949
11.5	140.950	109.950
13.0	140.951	109.951
16.0	140.952	109.952
18.0	140.989	109.989

Ø 3.75	Acqua	NeoPoros
8.0	140.976	109.976
10.0	140.977	109.977
11.5	140.978	109.978
13.0	140.979	109.979
16.0	140.980	109.980
18.0	140.981	109.981

Ø 5.0	Acqua	NeoPoros
8.0	140.953	109.953
10.0	140.954	109.954
11.5	140.955	109.955
13.0	140.956	109.956
16.0	140.957	109.957
18.0	140.990	109.990

Ø 4.0	Acqua	NeoPoros
8.0	140.982	109.982
10.0	140.983	109.983
11.5	140.984	109.984
13.0	140.985	109.985
16.0	140.986	109.986
18.0	140.987	109.987

Ø 6.0	Acqua	NeoPoros
8.0	140.1009	109.1009
10.0	140.1010	109.1010
11.5	140.1011	109.1011
13.0	140.1012	109.1012



Kit quirúrgico
Helix GM® compacto
premontado

110.303

Ø 7.0	Acqua	NeoPoros
8.0	140.1059	109.1059
10.0	140.1060	109.1060
11.5	140.1061	109.1061
13.0	140.1062	109.1062

SECUENCIA DE FRESADO INICIAL

Ø 3.5	103.170*	103.425		
Ø 3.75	103.170*	103.425	103.561	
Ø 4.0	103.170*	103.425	103.561	
Ø 4.3	103.170*	103.425	103.561	103.564
Ø 5.0	103.170*	103.425	103.561	
Ø 6.0	103.170*	103.425	103.561	103.564
Ø 7.0	103.170*	103.425	103.561	

SECUENCIA DE FRESADO PARA LOS TIPOS DE HUESO I Y II

103.578	103.513			
103.579	103.514			
103.584	103.580	103.515		
103.567	103.581	103.516		
103.564	103.567*	103.570	103.582	103.517
	No recomendado			
	No recomendado			

SECUENCIA DE FRESADO PARA LOS TIPOS DE HUESO III Y IV *OPCIONAL

103.561				
103.564*				
103.567*				
103.570*				
103.570	103.573*			
103.570	103.573	103.576		
103.570	103.573	103.576	103.577*	

Ø 3.5	Ø 2.8/3.5
	128.019

Ø 3.75	Ø 3.0/3.75
	128.020

Ø 4.0	Ø 3.3/4.0
	128.021

Ø 4.3	Ø 3.6/4.3
	128.022

Ø 5.0	Ø 6.0	Ø 4.3/5.0
		128.023

Carraca	104.050
---------	---------

Conexión GM para contraángulo	105.131
----------------------------------	---------

Conexión GM para carraca (corta)	105.129
-------------------------------------	---------

Conexión GM para carraca (larga)	105.130
-------------------------------------	---------

Tornillos de cierre GM	
0 mm	2 mm
117.021	117.022

Destornillador manual Neo	
104.058	Corto
104.060	Mediano
104.070	Largo

Cicatrizadores GM

	0.8 mm	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm	5.5 mm
Ø 3.3	106.207	106.208	106.209	106.210	106.211	106.212
Ø 4.5	106.213	106.214	106.215	106.216	106.217	106.218
Ø 5.5		106.250	106.251	106.252	106.253	
Ø 6.5		106.254	106.255	106.256	106.257	

Cicatrizadores personalizables GM

	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm	5.5 mm	6.5 mm
Ø 5.5	106.223	106.224	106.225	106.226	106.227	
Ø 7.0		106.228	106.229	106.230	106.231	106.232

TORNILLO DE CIERRE

ACCESORIOS QUIRÚRGICOS

Medidor de altura GM	128.028	Medidores de ángulo	
		17°	128.030
		30°	128.031

Fresa de perfil óseo GM	105.130	Medidores de ángulo del pilar	
		17°	128.032
		30°	128.033

TIPOS DE RESTAURACIONES		Soluciones atornilladas/cementadas									
Nivel de trabajo		Unitario									
		Nivel de implante									
Selección de pilar	Flujo de trabajo digital	Solución angulada de base de titanio GM (AS)		Flujos de trabajo digitales/convencionales						Base de titanio C para GM Exact	
		GH 0.8 mm 1.5 mm 2.5 mm	GH 0.8 mm 1.5 mm 2.5 mm 3.5 mm 4.5 mm	GH 0.8 mm 1.5 mm 2.5 mm 3.5 mm 4.5 mm	GH 0.8 mm 1.5 mm 2.5 mm 3.5 mm 4.5 mm	GH 0.8 mm 1.5 mm 2.5 mm 3.5 mm 4.5 mm	GH 0.8 mm 1.5 mm 2.5 mm 3.5 mm 4.5 mm	GH 0.8 mm 1.5 mm 2.5 mm 3.5 mm 4.5 mm	GH 0.8 mm 1.5 mm 2.5 mm 3.5 mm 4.5 mm	GH 0.8 mm 1.5 mm 2.5 mm 3.5 mm 4.5 mm	GH 0.8 mm 1.5 mm 2.5 mm 3.5 mm 4.5 mm
Impresión	Scanbody para implante GM	Transfer para implante GM Exact		Escaneo intraoral con scanbodies facilitados por Dentsply Sirona							
		Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta
Producción de modelo	Análogo del implante GM	Transfer para implante GM Exact		Escaneo intraoral con scanbodies facilitados por Dentsply Sirona							
		Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta
Provisional	Pilar Pro Peek GM	Pilar provisional GM para corona		Pilar provisional GM para puente							
		Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta
Escaneo de modelo	Scanbody para implante GM	Transfer para implante GM Exact		Escaneo intraoral con scanbodies facilitados por Dentsply Sirona							
		Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta
Coping final	Cilindro calcinable para base de titanio	Transfer para implante GM Exact		Escaneo intraoral con scanbodies facilitados por Dentsply Sirona							
		Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta
Tornillos	Tornillo para base de titanio GM AS	Tornillo GM Neo para bases de titanio y Pro Peek		Tornillo Neo GM							
		Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta
Llaves	Destornillador de solución angulada (AS)	Conexión torque Neo		Conexión torque Neo							
		Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta	Cubeta cerrada Cubeta abierta

TIPOS DE RESTAURACIONES		Soluciones atornilladas/cementadas															
Nivel de trabajo		Unitario/múltiple				Unitario				Múltiple							
		Nivel de implante															
Selección de pilar	 Bloque de titanio GM - soporte Medentika Ø 11.5mm 135.252 Ø 15.8 mm 135.253 Conexión torque Neo El tornillo se vende por separado	Flujo de trabajo digital				Flujo de trabajo convencional				 Base de titanio GM para puente GH 0.8 mm 135.399 1.5 mm 135.400 2.5 mm 135.401 3.5 mm 135.402 4.5 mm 135.403 Ø 3.5 135.399 Ø 4.5 135.404 Ø 5.5 135.409 Conexión torque Neo Permite una divergencia máxima de 10° para Ø 3.5 y 16° para Ø 4.5 y Ø 5.5	Flujo de trabajo digital						
	 Bloque de titanio GM - soporte Amann Girschbach Ø 12.0mm 135.226 Conexión torque Neo El tornillo se vende por separado					 Kit de Base de CoCr GM Exact Ø 3.5/3.75 118.309 Ø 4.0/4.3 118.310 Ø 5.0/6.0 118.311 Conexión torque Neo El conjunto incluye un pilar de CoCr GM, un tornillo de titanio y un análogo de implante GM. Para el uso después del cicatrizador específico para el tratamiento del tejido blando.											
Impresión	 108.207	 Transfer para implante GM Exact Cubeta cerrada 108.160 Cubeta abierta 108.162 Estándar 108.161 108.163 Larga				 Transfer para implante GM Exact Cubeta cerrada 108.160 Cubeta abierta 108.162 Estándar 108.161 108.163 Larga				 108.207				 Transfer para implante GM Cubeta abierta 108.158 Estándar 108.159 Larga			
	 Análogo del implante GM Ø 3.5/3.75/4.0/4.3 101.074 Ø 5.0/6.0/7.0 101.075 Convencional Ø 3.5/3.75 101.103 Ø 4.0/4.3 101.089 Ø 5.0/6.0/7.0 101.090 Reposicionable híbrido (convencional/digital)					 Análogo del implante GM Ø 3.5/3.75/4.0/4.3 101.074 Ø 5.0/6.0 101.075 Convencional								 Análogo del implante GM Ø 3.5/3.75/4.0/4.3 101.074 Ø 5.0/6.0/7.0 101.075 Convencional Ø 3.5/3.75 101.103 Ø 4.0/4.3 101.089 Ø 5.0/6.0/7.0 101.090 Reposicionable híbrido (convencional/digital)			
Provisional	 Pilar Pro Peek GM Ø 4.5 0.8 mm 114.874 1.5 mm 114.875 2.5 mm 114.876 Ø 6.0 114.880 114.881 114.882 Ø 4.5 3.5 mm 114.877 4.5 mm 114.878 5.5 mm 114.879 Ø 6.0 114.883 114.884 114.885 Conexión torque Neo					 Cicatrizador GM para pilar CoCr Ø 3.5/3.75 106.237 Ø 4.0/4.3 106.238 Ø 5.0/6.0 106.239 Destornillador manual Neo								 Pilar provisional GM para puente Ø 3.5 0.8 mm 118.352 1.5 mm 118.353 2.5 mm 118.354 3.5 mm 118.355 Ø 4.5 118.356 118.357 118.358 118.359 Conexión torque Neo			
	 Pilar provisional GM para corona Ø 3.5 0.8 mm 118.344 1.5 mm 118.345 2.5 mm 118.346 3.5 mm 118.347 Ø 4.5 118.348 118.349 118.350 118.351 Conexión torque Neo																
Escaneo de modelo	 Scanbody para implante GM 108.207					No aplicable								 Scanbody para implante GM 108.207			
	No aplicable								No aplicable								
Tornillos	 Tornillo GM Neo para bases de titanio y Pro Peek 116.291 GH 0.8/1.5/ 2.5 116.292 GH 3.5/4.5/5.5 y todas las bases de titanio	 Tornillo Neo GM Neotorque 116.285 Titanio 116.286				 Tornillo de cilindro de pilar Neo de CoCr Neotorque 116.282 Titanio 116.283								 Tornillo GM Neo 116.292			
	Conexión torque Neo				 Contraángulo Corto 105.135 Largo 105.167 Extra corto 105.146*				 Carraca Mediana 105.132 Corta 105.133 Larga 105.157								

*Recomendado para transfers de cubeta cerrada y abierta para implantes o pilares, tornillos de cierre y cicatrizadores.

TIPOS DE RESTAURACIONES		Soluciones atornilladas									
Nivel de trabajo		Unitario					Múltiple				
		Pilar GM Exact					Mini pilar cónico GM				
Selección de pilar		 Pilar GM Exact  GH 0.8 mm 115.269 1.5 mm 115.270 2.5 mm 115.271 3.5 mm 115.272 4.5 mm 115.273 5.5 mm 115.274 Conexión torque Neo					 Mini pilar cónico GM  GH 0.8 mm 115.243 1.5 mm 115.244 2.5 mm 115.245 3.5 mm 115.246 4.5 mm 115.247 5.5 mm 115.248 Conexión protésica hexagonal				
							 Mini pilar cónico GM Exact 17°/30°  GH 1.5 mm 17° 115.275 2.5 mm 115.276 3.5 mm 115.277 GH 1.5 mm 30° 115.278 2.5 mm 115.279 3.5 mm 115.280 Conexión torque Neo				
Impresión		Scanbody para pilar GM  108.220 Transfer para pilar GM  Cubeta cerrada 108.179					Scanbody para Mini pilar cónico  108.218 Transfer Exact de cubeta abierta del Mini pilar cónico Slim  108.176				
		Análogo del pilar  101.076 Convencional 101.101 Reposicionable híbrido (convencional/digital)					Análogo del Mini pilar cónico  101.020 Convencional 101.092 Reposicionable híbrido (convencional/digital)				
Provisional		 Cilindro de titanio del pilar Neo  118.300 Conexión torque Neo  Cilindro de protección del pilar Neo 106.221					Cilindro de titanio de Mini pilar cónico Neo  118.302 Cilindro de protección de Mini pilar cónico Neo 106.268 Barra distal Neo  125.116 Mini pilar cónico Neo para cilindro de barra distal  118.308 Conexión torque Neo				
		Scanbody para pilar GM  108.220					Scanbody para Mini pilar cónico  108.218				
Coping final		Cilindros de pilar Neo para corona  Calcinable 118.298 CoCr 118.299 Digital 118.362 Conexión torque Neo					Cilindros de Mini pilar cónico Neo  Calcinable 118.301 CoCr 118.303 Conexión torque Neo Cilindros de Mini pilar cónico Neo Técnica One Step Hybrid Calcinable 118.340 Latón 118.331 Titanio 118.382 Conexión torque Neo Cilindro One Step Hybrid de Micro pilar cónico Neo  Titanio 118.382 Conexión torque Neo				
		Tornillo GM Neo  116.290 GH 0,8 116.291 GH 1.5/2.5 116.292 GH 3.5/4.5/5.5 Tornillo de cilindro de pilar Neo  116.267 Neotorque 116.266 Titanio					Tornillo GM Neo  116.291 GH 1.5/2.5 116.292 GH 3.5/4.5/5.5 Tornillo de cilindro de Mini pilar cónico Neo  116.270 Neotorque 116.269 Titanio Protector para pulido de Mini pilar cónico 123.008 Tornillo de trabajo Neo One Step Hybrid 116.271				
Llaves		Conexión torque Neo  Contraángulo 105.135 Corto 105.167 Largo 105.146* Extra corto					Conexión protésica hexagonal  Carraca 105.132 Mediana 105.133 Corta 105.157 Larga				

TIPOS DE RESTAURACIONES	Soluciones atornilladas						Soluciones cementadas					
	Unitario/múltiple						Unitario					
	Micro pilar GM						Pilar anatómico GM Exact Click (SOLUCIÓN SOLO A PEDIDO)					
Selección de pilar	Micro pilar GM GH 0.8 mm 1.5 mm 2.5 mm 3.5 mm 4.5 mm 5.5 mm 115.255 115.256 115.257 115.258 115.259 115.260 Conexión protésica hexagonal						Pilar anatómico GM Exact Click 1.5 mm 2.5 mm 3.5 mm Estándar Estrecho 114.862 114.863 114.864 114.868 114.869 114.870 Pilar anatómico Click GM Exact 17º 1.5 mm 2.5 mm 3.5 mm Estándar Estrecho 114.865 114.866 114.867 114.871 114.872 114.873 Conexión torque Neo					
	Impresión	Scanbody para Micro pilar 108.219 Para coronas y puentes Transfer para micro pilar 108.182 108.178 Cubeta cerrada para corona Cubeta abierta Slim para puente						Transfer para implante GM Exact Cubeta cerrada Cubeta abierta 108.160 108.161 108.162 108.163 Estándar Larga				
Producción de modelo	Análogo del Micro pilar 101.078 101.091 Convencional Reposicionable híbrido (convencional/digital)						Análogo del implante GM Ø 3.5/3.75/4.0/4.3 Ø 5.0/6.0/7.0 101.074 101.075 101.076 101.077 Convencional Reposicionable híbrido (convencional/digital)					
Provisional	Cilindro de titanio de Micro pilar Neo 118.297 118.317 Para puente Para corona Cilindro de protección del Micro pilar Neo 106.267 Conexión torque Neo						Cilindro provisional para pilar anatómico Click 118.334 118.335 Estándar Estrecho					
Escaneo de modelo	Scanbody para Micro pilar GM 108.219 Para coronas y puentes						No aplicable					
Coping final	Conventional Cilindros de Micro pilar Neo Calcinable CoCr 118.295 118.296 118.315 118.316 Cilindros de Micro pilares Neo para técnica One Step Hybrid Calcinable Latón Titanio 118.341 118.333 118.381 Conexión torque Neo Digital Cilindro One Step Hybrid de Micro pilar cónico Neo Titanio 118.381 118.363 Para puente Para corona Conexión torque Neo						No aplicable					
Tornillos y protectores para pulido	Tornillo de cilindro de Micro pilar Neo Neotorque Titanio 116.270 116.269 Protector para pulido de Micro pilar Para puente 123.015 Tornillo de trabajo Neo One Step Hybrid 116.271 Conexión torque Neo						Tornillo GM Neo 116.291 116.292 GH 1.5/2.5 GH 3,5					
Llaves	Conexión torque Neo Contraángulo Corto Largo Extra corto 105.135 105.167 105.146* Carraca Mediana Corta Larga 105.132 105.133 105.157 Conexión protésica hexagonal Carraca Contraángulo 105.137 105.138						Conexión torque Neo Contraángulo Corto Largo Extra corto 105.135 105.167 105.146* Carraca Mediana Corta Larga 105.132 105.133 105.157					

TIPOS DE RESTAURACIONES

Nivel de trabajo

Soluciones cementadas

Unitario

Pilar Universal Click GM Exact

Selección de pilar

Pilar Universal Click GM Exact

GH

0.8 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

4.5 mm

5.5 mm

4 mm

Ø 3.3

114.826

114.827

114.828

114.829

114.830

114.831

4 mm

Ø 4.5

114.838

114.839

114.840

114.841

114.842

114.843

6 mm

Ø 3.3

114.832

114.833

114.834

114.835

114.836

114.837

6 mm

Ø 0.5

114.844

114.845

114.846

114.847

114.848

114.849

Conexión torque Neo

Pilar Universal Click GM Exact 17°/30°

4 mm

17°

6 mm

Ø 3.3

Ø 4.5

Ø 3.3

Ø 4.5

1.5 mm

114.802

114.808

114.805

114.811

2.5 mm

114.803

114.809

114.806

114.812

3.5 mm

114.804

114.810

114.807

114.813

4 mm

30°

6 mm

Ø 3.3

Ø 4.5

Ø 3.3

Ø 4.5

1.5 mm

114.814

114.820

114.817

114.823

2.5 mm

114.815

114.821

114.818

114.824

3.5 mm

114.816

114.822

114.819

114.825

Impresión

Scanbody intraoral para pilar Universal

4 mm

Ø 3.3

108.143

4 mm

Ø 4.5

108.145

6 mm

Ø 3.3

108.144

6 mm

Ø 4.5

108.146

Transfer del pilar universal Click

4 mm

Ø 3.3

108.172

4 mm

Ø 4.5

108.174

6 mm

Ø 3.3

108.173

6 mm

Ø 4.5

108.175

Producción de modelo

Análogo para pilar Universal

4 mm

Ø 3.3

101.070

4 mm

Ø 4.5

101.072

6 mm

Ø 3.3

101.071

6 mm

Ø 4.5

101.073

Click (convencional)

4 mm

Ø 3.3

101.097

4 mm

Ø 4.5

101.099

6 mm

Ø 3.3

101.098

6 mm

Ø 4.5

101.100

Reposicionable híbrido (convencional/digital)

Provisional

Cilindro provisional para pilar Universal Click

4 mm

Ø 3.3

118.304

4 mm

Ø 4.5

118.306

6 mm

Ø 3.3

118.305

6 mm

Ø 4.5

118.307

Escaneo de modelo

No aplicable

Coping final

Cilindro para pilar Universal (calcinable)

4 mm

Ø 3.3

118.181

4 mm

Ø 4.5

118.183

6 mm

Ø 3.3

118.182

6 mm

Ø 4.5

118.184

Tornillos

Tornillo GM Neo

116.291

GH 1.5/2.5

116.292

GH 3,5

Llaves

Conexión torque Neo

Contraángulo

105.135

Corto

105.167

Largo

105.146*

Extra corto

Carraca

105.132

Mediana

105.133

Corta

105.157

Larga

Sobredentadura

Novaloc GM

Accesorios

O´ring

Rosa

102.108

Violeta

102.115

Negro

102.118

Disponibles en polímero; Violeta: más

Montador de O´ring

Mango

104.054

Montador

104.053

Removedor de O´ring

104.055

Secuencia de instalación

Attachment Equator GM

1.5mm

102.143

2.5mm

102.144

3.5mm

102.145

4.5mm

102.146

5.5mm

102.147

Disco de protección

Conexión Torque 1.2 | 32N.cm | 105.005

10 unidades

102.077

O´ring con cilindro

102.107

043

*Recomendado para transfers de cubeta cerrada y abierta para implantes o pilares, tornillos de cierre y cicatrizadores.